

	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO RESPIRADOR N95 REF. 9510	CÓDIGO:	FT-FR-01
		FECHA DE EMISIÓN:	20-OCT-2025
	FABRICACIÓN DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN:	02

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Los respiradores NITTA son dispositivos médicos libres de mantenimiento, diseñados para ofrecer una protección eficaz al usuario. Están compuestos por una pieza preformada que cubre la mitad del rostro, incluyendo nariz, boca y mentón, asegurando un sellado hermético al entrar en contacto con la piel. Este ajuste impide la entrada de partículas y contaminantes suspendidos en el aire, incluidos agentes patógenos. Nuestro modelo 9510 está recomendado para la protección contra contaminantes y partículas suspendidas en el aire de hasta 0,075 micras.



REF: 9510-1
Respirador NIOSH N95 Blanco



REF: 9510-2
Respirador NIOSH N95 Negro

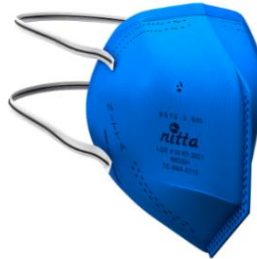

REF: 9510-3
Respirador NIOSH N95 Azul



REF: 9510-4
Respirador NIOSH N95 Verde

2. APLICACIONES

Nuestros respiradores son ideales para entornos industriales con presencia de material particulado que no generen vapores peligrosos como:

- Construcción
- Minería
- Manufactura
- Industria de Alimentos
- Petróleo y derivados
- Cementeras
- Empresas de Aseo y limpieza
- Industria Textil
- Ladrilleras

En el sector salud nuestros respiradores son recomendados para todos los entornos, debido a que brindan protección eficaz a todos aquellos profesionales que atienden pacientes en general y personas en aislamiento por agentes infecciosos de transmisión aérea como:

- Tuberculosis
- Varicela
- Zoster diseminado
- SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave)
- Covid-19

	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO RESPIRADOR N95 REF. 9510	CÓDIGO:	FT-FR-01
		FECHA DE EMISIÓN:	20-OCT-2025
	FABRICACIÓN DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN:	02

3. INSTRUCCIONES DE USO

El uso inadecuado del Respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:



4. CONDICIONES DE USO

El Respirador N95 Ref. 9510 protege contra contaminantes en el aire, incluyendo neblinas, humos y partículas sólidas o líquidas no oleosas. El uso inadecuado del respirador compromete la seguridad del usuario. Para su uso en el trabajo, debe pasar una prueba de ajuste cualitativa o cuantitativa según el programa OSHA.

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (Promedio)	2x10 ⁶ partículas TLV-TWA 0,05 mg/m ³ /ft ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO RESPIRADOR N95 REF. 9510	CÓDIGO:	FT-FR-01
		FECHA DE EMISIÓN:	20-OCT-2025
	FABRICACIÓN DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN:	02

5. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Nuestros Respiradores están disponibles en el mercado de la siguiente manera:

	Referencia: N95 serie 9510
	1 unidad (Empaque Individual)
	Cajas x 500 unidades (Bolsas transportadoras con 20 paquetes x 25 unidades)
	Bolsa de polipropileno biorientado, BOPP. Dimensiones (Largo-Ancho): 20 x 13 cm
	Bolsa transportadora, plástica, tipo fuelle y sellada al calor.
	Caja de cartón corrugado, Calibre: 790 Dimensiones (Largo-Ancho-Alto): 60 x 40 x 30 cm

6. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Los respiradores N95 de Nitta cumplen con estrictas especificaciones de calidad que abarcan aspectos como la capacidad de filtración, porcentaje de penetración y pruebas de resistencia respiratoria.


	Peso: 10,0 ± 0,5 g
	Nivel De Filtración: >95%
	Porcentaje Penetración: < 5%
	Resistencia Inhalación: < 35 mmH2O
	Resistencia Exhalación: < 35 mmH2O

 Respira mejor, vive más	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO RESPIRADOR N95 REF. 9510	CÓDIGO:	FT-FR-01
		FECHA DE EMISIÓN:	20-OCT-2025
	FABRICACIÓN DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN:	02

7. PROPIEDADES DEL PRODUCTO



8. COMPOSICIÓN

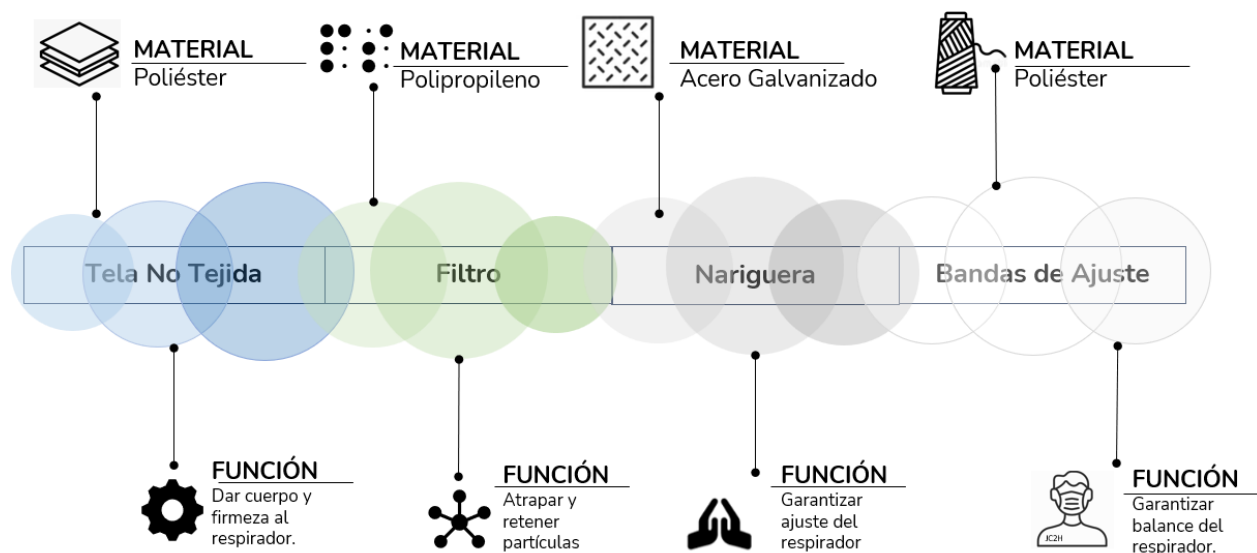

	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO RESPIRADOR N95 REF. 9510	CÓDIGO:	FT-FR-01
		FECHA DE EMISIÓN:	20-OCT-2025
	FABRICACIÓN DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN:	02

9. VIDA ÚTIL



5 años

El Respirador NITTA, libre de mantenimiento, es un producto no perecedero. Si se conserva en su empaque original y en condiciones adecuadas, puede usarse más allá de su fecha de caducidad.

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares frescos, secos y limpios, fuera de aéreas contaminadas, lejos de la luz solar directa, humedad excesiva y químicos corrosivos o dañinos.



Temperatura: 15°C a 30°C



Humedad Máxima: 80%

11. APROBACIONES Y CERTIFICACIONES

CERTIFICACIÓN	ENTIDAD REGULATORIA	NUMERO DE APROBACIÓN	LINK DE VERIFICACIÓN
NIOSH	Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (USA).	TC- 84A- 8118	https://wwwn.cdc.gov/niosh-cel/
FDA	Administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos.	3020623413	https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/TextSearch.cfm
INVIMA	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos Y Alimentos (COLOMBIA)	2023DM-0026488	https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Estos entes regulatorios auditan nuestra empresa y producto periódicamente según lo dicta sus normativas.

	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO RESPIRADOR N95 REF. 9510	CÓDIGO:	FT-FR-01
		FECHA DE EMISIÓN:	20-OCT-2025
	FABRICACIÓN DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN:	02

12. DATOS DEL FABRICANTE

	NITTA S.A CASA AGROPECUARIA LOS ANDAQUIES S.A.S
	Zona Industrial Toberín - Carrera 21 No. 166 – 57 Bogotá - Colombia
	+57 317 640 3066
	comerciointernacional@nitta.com.co servicioalcliente@nitta.com.co
	www.nitta.com.co